



EMODIAL®

EXIT-POCKET® WP



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

**Wasserdichter Beutel
für den Katheterschutz**

Ref. DE0013 - Rev. 04/2025

EXIT-POCKET® WP

Beschreibung

Wasserdichte Katheter-Tasche, welche die Katheteraustrittsstelle und die Katheterenden zuverlässig beim Duschen, Baden und Schwimmen schützt.

Indikation

Die EXIT-POCKET WP ist eine komplett wasserdichte Tasche, die direkt auf der Haut angebracht wird. Sie wurde speziell entwickelt, um Katheter während des Duschens, Badens oder bei Wasseraktivitäten (z. B. Schwimmen, Tauchen) zu schützen.

Zweck

Die Tasche schützt die Eintrittsstelle des Katheters vor Wasserkontakt und hilft so, Infektionen zu vermeiden. Wenn sie richtig angebracht ist, bleibt der Katheter komplett trocken.


Vorteile

- Einfaches und schnelles Anbringen
- Angenehmer Tragekomfort
- Verbessert die Lebensqualität
- Leicht und schnell zu entfernen

Wasserdichter Beutel für den Katheterschutz

Anwendung – Schritt für Schritt

1. Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber und trocken ist.
2. Führen Sie die Katheter-Enden vorsichtig in die dafür vorgesehene Tasche ein.
3. Ziehen Sie die untere Schutzfolie ab und platzieren Sie diesen Teil der Klebefläche so auf der Haut, dass er unterhalb des Katheterverbands sitzt. Drücken Sie ihn leicht an.
4. Entfernen Sie nun die obere Schutzfolie. Bringen Sie die verbleibende Klebefläche rund um den Katheterverband an – idealerweise von unten nach oben, um Luftblasen und Falten zu vermeiden.
5. Haftung sichern - Warten Sie etwa 10 Minuten, bevor Sie ins Wasser gehen.
6. Duschen oder Baden Sie vorsichtig. Vermeiden Sie dabei Reibung an der Klebestelle.
7. Zum Abnehmen lösen Sie vorsichtig eine Ecke der Klebefläche und ziehen die Tasche langsam ab – bitte nicht am Katheter selbst ziehen!

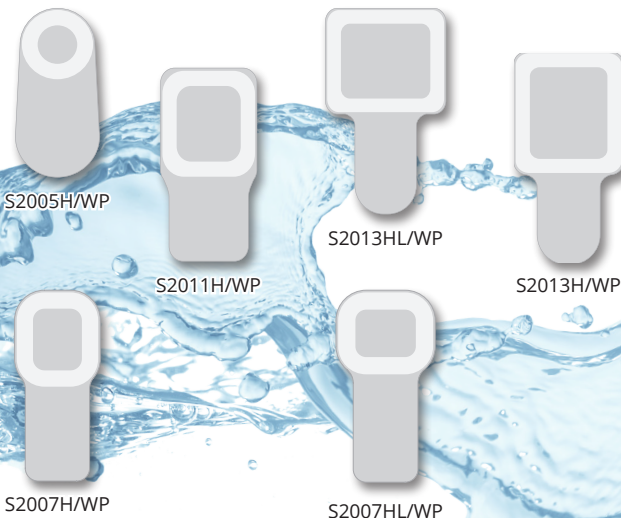

BESTELLDATEN

CODE	GRÖÖE (cm)			INDIKATION	Stck. BOX
	Öffnung	IL	IH		
S2005H/WP	ø 5	11	22	Bad und Dusche	50
S2011H/WP	10 x 9	13	26	Bad und Dusche	50
S2013HL/WP	13 x 11	17,6	30	Bad und Dusche	50
S2013H/WP	11 x 13	15,6	30	Bad und Dusche	50
S2007H/WP	5,5 x 7	10	22	Bad und Dusche	25
S2007HL/WP	7 x 5,5	12	22	Bad und Dusche	25

KLASSIFIKATION • MEDIZINPRODUCT - KLASSE I
STERILIZATION • UNSTERILE



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG